


Demografischer
Wandel
führt zu
Patienten

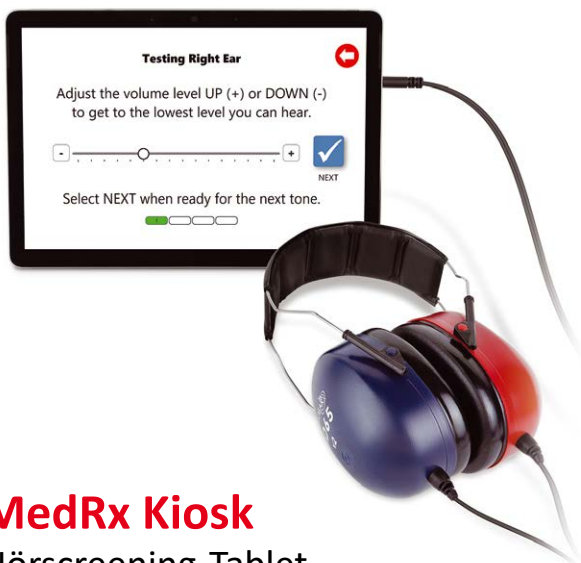

MedRx Kiosk
Hörscreening-Tablet

Das eigenständige Hörscreening- Tablet

Entwickelt für den unbeaufsichtigten Einsatz an Standorten Ihrer Wahl. MedRx Kiosk verbindet sich mit unserer Cloud-basierten Lösung HearingBI, für Echtzeit-Leads, Ergebnisse und vieles mehr.



MedRx Kiosk Eigen-Screening und Leadgenerierung


Erweitern Sie die Reichweite Ihrer Klinik, indem Sie Ihr Kiosk in Gemeindezentren, Arztpraxen, Apotheken und an Partnerstandorten aufstellen.

Standardzubehör für Kiosk

- Kopfhörer DD65 v2
- Software und Handbücher

Optionales Zubehör

- Tastatur
- Ständer

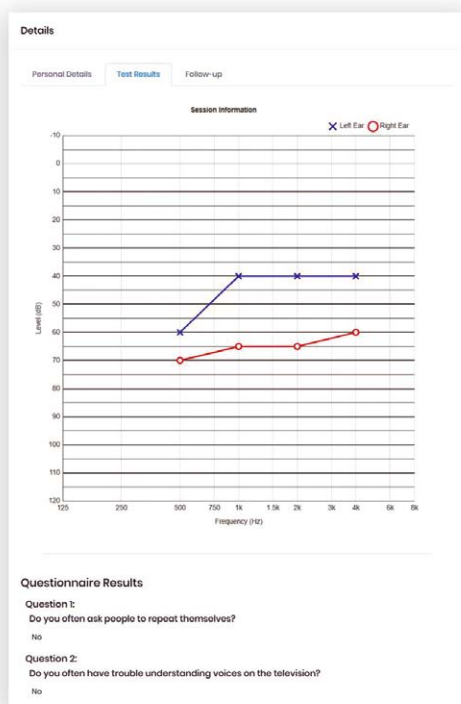

Wenn Sie sich bei Ihrem Internetportal anmelden, können Sie Audiogramm- und Fragebogeninformationen einsehen, während Probanden Ihren Kiosk benutzen.

Kalibriertes Eigen-Screening

Das MedRx Kiosk ist ein kalibriertes Screening-Gerät, das drei schnelle und einfache Luftschwellenwerttests durchführen kann. Die Hörscreenings können schnelle Schwellenwertauswertungen oder eine Gehört/Nicht gehört-Analyse liefern. Jeder Test dauert weniger als 5 Minuten und ist für ein einfaches, intuitives Verständnis des Probanden konzipiert. Das MedRx bietet auch 1-minütige, auf den Probanden zugeschnittene Tutorial-Videos, die die bevorstehenden Screening-Aufgabe erläutern und erleichtern. Das Screening von Probanden in Ihrer Praxis oder in Gemeindezentren war noch nie so einfach wie mit dem MedRx Kiosk.

Unbeaufsichtigte Tests

MedRx bietet viele Variationen des Kiosk an, darunter reine Tablet-Screener oder vollständig gekapselte und gesicherte Tablets mit Ständer und Desinfektionstüchern. Die MedRx Kiosk-Software kann in allen unbeaufsichtigten Umgebungen ausgeführt werden, in denen WLAN verfügbar ist. Das Kiosk kann sich mit unserer Cloud-Datenbank verbinden und alle Screening-Informationen sicher an Ihr Cloud-Datenbankkonto senden.* Sollte das WLAN unterbrochen werden, speichert die Software die Hörscreenings verschlüsselt, bis die Verbindung wiederhergestellt ist und die Übertragung erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Software ist mit Looping-Schnittstellen und Timeout-Optionen ausgestattet. Das heißt, dass die Software am Ende jedes Tests anzeigt, dass der Test beendet ist und zum Startbildschirm zurückkehrt. Erweitern Sie die Reichweite Ihrer Klinik, indem Sie Ihr Kiosk in Gemeindezentren, Arztpraxen, Apotheken und an Partnerstandorten aufstellen.

*Abonnement für Cloud-Datenbank erforderlich.

- Unbeaufsichtigte Tests
- Jeder Test dauert weniger als 5 Minuten
- Kalibriertes Eigen-Screening
- Probanden erhalten die Ergebnisse und Ihre Kontaktdaten per E-Mail
- Anzeige der Ergebnisse in Echtzeit
- Wählen Sie reine Tablet-Screener oder vollständig gekapselte und gesicherte Tablets mit Ständer

Anzeige der Screening-Ergebnisse

Die Screening-Ergebnisse des MedRx Kiosk sind in Echtzeit über unsere Cloud-Datenbank verfügbar. Wenn Sie sich bei Ihrem Internetportal anmelden, können Sie Audiogramm- und Fragebogeninformationen anzeigen, während Probanden Ihren Kiosk benutzen. Wählen Sie E-Mail-Benachrichtigungen zu jedem abgeschlossenen Screening aus, und Sie können sofort darauf reagieren.

Ihre Probanden haben unmittelbar nach Abschluss des Screenings Zugriff auf die Ergebnisse. Sie als Besitzer des Kiosk können wählen, ob sie die Screening-Ergebnisse als einfache Bewertung (Ergebnisstufe Normal, Leicht, Mäßig oder Kontrolle) oder detailliert ausgeben wollen. Außerdem können die Ergebnisse automatisch an jeden Probanden gesendet werden, wenn die Untersuchung abgeschlossen ist.

Sicherheit

Alle Verbindungen zu unserer Datenbank sind während der Übertragung mit 256-Bit-SSL-Verbindungen gesichert, und die Datenbanken sind im Ruhezustand verschlüsselt. Sichere Anmeldungen mit Überwachungsprotokollen helfen Ihnen dabei, genau zu verfolgen, wer auf Ihr Konto zugegriffen hat, und was genau während dieses Zugriffs getan wurde. Das MedRx Kiosk und die Cloud-Datenbank erfüllen und übertreffen alle HIPAA-, DSGVO- und HiTECH-Anforderungen an den Datenschutz.

Analyse und Verfolgung

MedRx hat die Cloud-Datenbank so konzipiert, dass sie von einzelnen Kliniken bis hin zu Großkunden skaliert werden kann. Speziell gestaltete Dashboards erklären genau, wie jedes Screening-Gerät funktioniert. Die Gruppierungsfunktion im Kiosk ermöglicht die Anzeige der Ergebnisse für verschiedene Gruppen auf unterschiedliche Arten. Filtern Sie Statistiken nach Zeit, Kliniken und Regionen, um die Anzahl der erhaltenen Kontakte, den Prozentsatz der Hörverluste, die pro Tag erhaltenen Leads und mehr anzuzeigen. MedRx setzt darauf, dass jeder Besitzer eines Kiosk ganz genau verstehen kann, wie das Produkt seinem Unternehmen zugute kommt.



Das Screening von Probanden in Ihrer Praxis oder in Gemeindezentren war noch nie so einfach wie mit dem MedRx Kiosk.

Erweitern Sie Ihr Unternehmen

MedRx Kiosk bietet Unternehmen neue Möglichkeiten, ihre Reichweite zu erweitern. Das MedRx-Kiosk-System kann in kommunalen oder öffentlichen Einrichtungen aufgestellt werden, um einen einfachen Zugang zu Hörscreenings zu ermöglichen. Dieser dringend benötigte kommunale Dienst kann die Sensibilisierung für Hörverluste durch Bereitstellung einfacher Anlaufstellen für Hördienstleistungen verbessern. Alle durchgeführten Screenings können von Ihrem Klinikpersonal überprüft werden, und Sie können den Probanden Informationen zu Hördienstleistungen, zum Erhalt des Gehörs oder zu Hörgeräten zur Verfügung stellen. Filtern Sie Patientenlisten aus unseren Cloud-Datenbanken und exportieren Sie sie auf Ihre bevorzugte Kommunikationsplattform.

Probanden, die ein Screening absolvieren, können automatisch E-Mails mit Informationen zum Hörverlust und mit den Kontaktdaten und Logos Ihrer Klinik erhalten. Alle E-Mails sind so verfasst, dass der Proband sie versteht und sich an eine Klinik Ihrer Wahl wendet.



Kiosk

Technische Daten

Normen: Screening-Audiometer nach ANSI 53.6-2010, IEC 60645 1-2017, Typ 4; Tonaudiometrie

Ausgänge: DD65v2a und DD65 v2

Frequenzbereich: Luft: 125 Hz - 8000 Hz

Ausgangspegelbereich: Luftleitung: 10 dB HL bis 120 dB HL max.

Dämpfung: 5-dB oder 1-dB-Schritt

Kompatibel mit: HearingBI, NOAH™

Leistungsbedarf: 15 V; 0, 4 A

Maße: Ca. 19,1 x 9,3 x 13,4 cm / 7,5" x 3,6" x 5,3" (B x H x T)
(ohne Anschlüsse)

Gewicht: 389 g / 0,86 lbs

Standardzubehör: Audiometer-Headset DD65v2a (optional DD65 v2),
Software und Handbücher



Voll gekapselte und gesicherte Tablets mit Ständer.

MedRx®

Die Größe steckt im Detail

MedRx International

MAICO Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70-71

10553 Berlin, Deutschland

Telefon: +49 30 70 71 46 50

Fax: +49 30 70 71 46 99

E-Mail: medrx-sales@maico.biz

www.medrx-diagnostics.com

Überreicht von:

MX-KIO-INTDS-1 Rev. 1

Nachbetreuung und Zielsetzung

Das MedRx Kiosk und das Cloud-Datenbanksystem wurden entwickelt, um diagnostische Auswertungen in Ihrer Klinik zu erleichtern. Alle Aspekte im Screening-Prozess weisen Probanden auf die Hörklinik Ihrer Wahl hin. Dazu gehören benutzerdefinierte Logos, Adressen und Telefonnummern, die der Proband während des Tests sieht. Wenn der Test abgeschlossen ist, hilft die Cloud-Software den Experten, die Nachbetreuung mit dem finalen Ziel der Vereinbarung eines Kliniktermins aufzunehmen. Die Experten können innerhalb der Software Erinnerungen zur Nachbetreuung einrichten und Notizen zum Status der Nachbetreuung machen. Dank der erweiterten Filterung können Sie große Listen nach Ihren Bedürfnissen filtern und in Segmenten exportieren. Die segmentierten Exporte können bei der Überführung von Leads in bereits bestehende Marketingplattformen hilfreich sein. MedRx Kiosk und die Cloud-Datenbank sind Werkzeuge für Experten, die Menschen in ihrem kommunalen Umfeld erreichen wollen.



Geeignet für Tests zuhause oder Drive-In-Tests.

