




Förberedelse av mätningen

För att komma igång tryck på antingen den röda eller blå pilknappen   för att slå på enheten. Om easyTymp förvaras i vaggan kommer den att slås på automatiskt när enheten tas ur vaggan.

Hantering av öronpropparna



Välj en öronspropp av lämplig storlek från öronsproppsuppsättningen, beroende på storlek och form på hörselgången och örat. Sätt öronsproppen tätt på probpetsen.

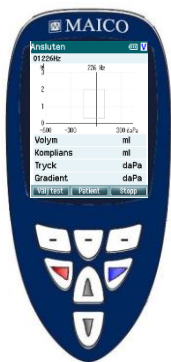Användarpanel


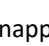


Funktionstangenter:

- Toppknappar: Funktionerna är relaterade till de funktioner som anges i displayen ovanför den enskilda funktionsknappen. (t.ex. välja test, patient, stopp).

  Piltangenterna: Aktivera easyTymp genom att trycka på höger eller vänster piltangent.

Stäng av easyTymp genom att trycka på båda tangenterna samtidigt.

  Knapparna upp och ner: Bläddra i genom de olika easyTymp-inställningsmenyerna, testprotokollen eller styr uppåt och nedåt i displayen.

Starta testet

easyTymp startar alltid på testskärmen, redo att påbörja en mätning. Den kommer att använda samma protokoll som tidigare.

03 Tymp 226Hz + Auto Reflex

Välj test

Patient

Stopp

I testskärmen visar den andra raden namnet på det protokoll som används.


Öppnar skärmbild med tillgängliga testprotokoll.

På den här skärmenbilden kan data sparas till en befintlig patient som kan ha laddats upp från en databas eller spara data till en ny patient.

Tryck på Stop för att avsluta mätningen.


easyTymp kommer automatiskt att gå till skärmenbilden Klar när den har avslutat testningen.

Displayer

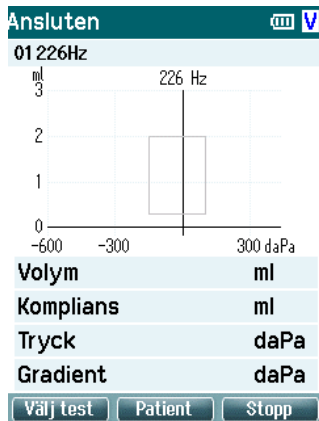


Tryck på Välj test för att ladda ett annat protokoll.

Tryck på Patient för att visa listan över patienter.

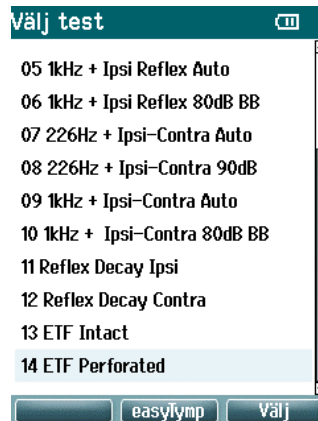

Gå uppåt/nedåt för att välja testet och starta mätningen genom att trycka på Välj.

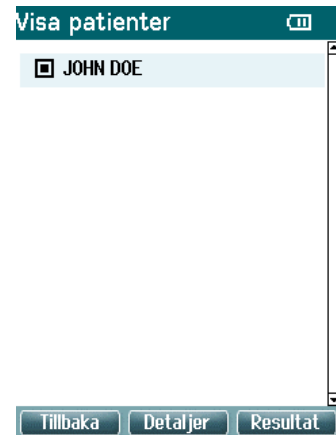


Gå uppåt/nedåt för att välja en patient.


Tryck på Resultat för att visa de lagrade resultaten.

Administrera mätning

easyTymp kommer automatiskt att gå till skärmen Klar när den har avslutat testningen. Från skärmen Klar kan mätningar av båda öronen granskas, skrivs ut och/eller sparas.

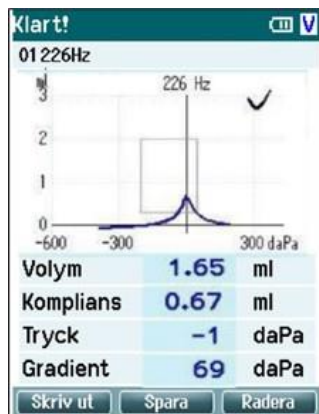

Bläddra nedåt för att visa reflexresultaten.

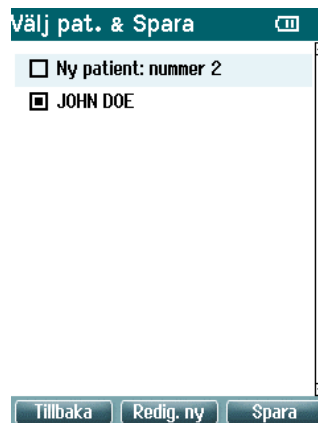

Spara antingen data till en befintlig patient eller spara data till en ny patient.



Knapparna Upp och Ner flyttar tangentbordets val ett tecken upp eller ner. När du redigerar födelsedatumet ändrar upp- och nedknappen det numeriska värdet.