

Oticon Opn S, Oticon Opn Play & Oticon Ruby

miniRITE R - tietoa kuuloalan ammattilaisille

Oticonin miniRITE R tarjoaa asiakkaallesi toimivuutta läpi päivän sekä helposti toimipisteessä tapahtuvan litiumioniakun vaihdon. Käsitellessäsi miniRITE R:ää, ole hyvä ja huomioi:

- Lithiumioniakut toimitetaan eurooppalaisten säännösten mukaisesti vajaalla latauksella. Suosittelemme lataamaan akun täyteen ennen sovitusta.
- miniRITE R ja litiumioniakku muodostavat parin, ja ne on rekisteröity sarjanumeroilla jäljittämisen helpottamiseksi. Vaihtaessasi akun uuteen, ole hyvä ja päivitä akun sarjanumero Genie 2:ssa. (katso toiselta puolelta lisäohjeita).
- Palautus- tai korjausmenettely eurooppalaisten säännösten mukaisesti: lähetä kuulokoje sammutettuna akku paikallaan. Ilmoita kuljetusmerkinnässä seuraava teksti:

Laitteeseen asetettu nappiparisto - ei rajoitettu

- Älä koskaan palauta irrallista litiumioniakkua Oticonille, oli se sitten ehjä tai vaurioitunut. Takuuvaatimusta varten, ole hyvä ja ota kuva akusta ja lähetä se sähköpostitse yhdessä kuulokojeen sarjanumeron kanssa osoitteeseen info@audmet.fi.

Kuinka lithiumioniakku vaihdetaan


Vaihe 1:

Avaa paristokotelo punaisella työkalulla (890-22-270-00). Käytä paristokotelon reunaa hyväksi asettaaksesi työkalun oikein.




Vaihe 2:

Vaihda akku niin, että akussa oleva plusmerkki osoittaa ylöspäin, samoin kuin plusmerkintä paristokotelossa. Yhdistä kuulokoje Genie 2:een.

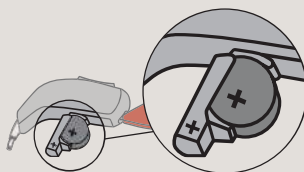

Vaihe 3:

Rekisteröi uuden akun 10-numeroinen sarjanumero Genie 2:een. Sarjanumero löytyy akun pakkauksesta.

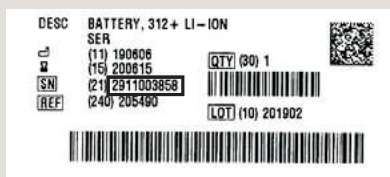

Vaihe 4:

Hävitä käytetty akku paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti. Ohjeista asiakas lataamaan uusi akku kotona täyteen. Asiakas voi kuitenkin käyttää kuulokojetta matkalla kotiin. Ensimmäisellä käyttökerralla akun varaus riittää 1-2 tunniksi.

Huomaa, miniRITE R:ssä voidaan käyttää vain Oticonin toimittamia vara-akkuja. Akut voi vaihtaa vain kuuloalan ammattilainen tai Oticonin edustaja.

221127FI / 2020.05.05 / v1