

Reinigungsanleitung zur erneuten Verwendung von DemoFlex-Hörsystemen

Die folgenden Maßnahme zur Reinigung und Desinfektion sind unbedingt erforderlich, bevor Sie DemoFlex-Hörsysteme an einen anderen, neuen Nutzer aushändigen.

 Tauchen Sie die Hörsysteme nicht in Flüssigkeiten ein, da dies die Mikrofone beschädigen könnte.

Erforderliche Reinigungsmittel:

- Kleine, weiche Bürste
- Verwenden Sie für die beschriebene Reinigung und Desinfektion ein Tuch, das Reinigungs- und Desinfektionsmittel enthält.
 - Folgende Tücher können verwendet werden:
 - CaviWipes
 - Tücher mit nachgewiesener Desinfektionswirkung, die sowohl Ethanol/ Isopropanol zur Desinfektion als auch Reinigungsmittel (Tenside) enthalten

1. Vorbereitung des Hörsystems

- Entfernen Sie den Hörer entsprechend der Anleitung von Demant
- Stellen Sie sicher, dass die Farbmarkierungen links/rechts befestigt sind

2. Reinigen und desinfizieren Sie das Hörsystem

- Verwenden Sie die Bürste, um Verschmutzungen aus Vertiefungen zu entfernen
- Reinigen Sie mit einem Tuch alle Außenflächen der Hörsysteme, einschließlich:
 - Gehäuse-Spalt zwischen der Ober- und Unterschale des Hörsystemgehäuse
 - Bereich um den Taster
 - Bereich zwischen den Ladekontakten
 - Bereich zwischen linker bzw. rechter Farbmarkierung sowie Seriennummernplättchen
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Außenflächen des Hörsystems gereinigt haben
- Überprüfen Sie visuell das Hörsystem
- Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang bis das Hörsystem sauber ist
- Verwenden Sie ein neues Tuch, um alle Oberflächen des Hörsystems zu desinfizieren, einschließlich:
 - Gehäuse-Spalt zwischen der Ober- und Unterschale des Hörsystemgehäuse
 - Bereich um den Taster
 - Bereich zwischen den Ladekontakten
 - Bereich zwischen linker bzw. rechter Farbmarkierung sowie Seriennummernplättchen
- Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen am Hörsystem mit dem Desinfektionsmittel bedeckt sind
- Lassen Sie es mindestens 3 Minuten lang einwirken. Trocknet das Desinfektionsmittel vor Ablauf der 3 Minuten, tragen Sie das Desinfektionsmittel erneut auf
- Lassen Sie das Hörsystem an der Luft trocknen