

Detect Door Pro

Puzzle Pro
trådløs dørklokke

Brugervejledning
Dansk



 **Phonic Ear**[®]
Connected to life

Indholdsfortegnelse

Introduktion	4
Pakkens indhold	5
Oversigt	6
Isæt batteri	9
Parring til Puzzle Pro modtagere	10
Slet parring til Puzzle Pro modtagere	12
Installering	13
Fejlsøgning	17
Test og godkendelser	18
Miljøinformation	19
Garanti	21
Sikkerhedsforanstaltninger	24

Introduktion

Detect Door Pro er en af Puzzle Pro systemets alarmsendere. Den fungerer som en trådløs dørklokke og erstatter den almindelige trykknop uden for døren.

Når en besøgende trykker på Detect Door Pro trykknappen, sendes der et trådløst signal til Puzzle Pro systemets alarmmodtager(e).

Detect Door Pro fungerer med alle Puzzle Pro modtagere fx Call Pro, Flash Pro, PocketVib Pro, Wake Pro, Loop Pro og Link Pro.

Detect Door Pro kan også forbindes til en eksisterende dørklokke, hvis det ønskes.

Pakkens indhold

Pakken indeholder følgende dele:



Detect Door Pro
trådløs dørklokke



Batteri
3,6V ER 14505



Brugervejledning

Oversigt

Front



Statusindikator


Indikerer, om
enheden afsender
en alarm

Trykknop

Aktivering af
enheden

Oversigt

Fronten set indefra

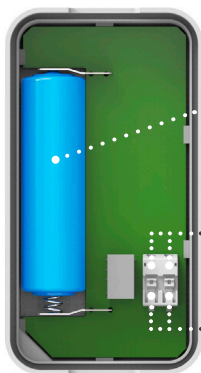

Batteriskuffe

Batteritype
3,6V ER 14505


Indgangsstik

Til tilslutning af
eksisterende dørklokke

Låse

Översigt

Bagpladen set indefra

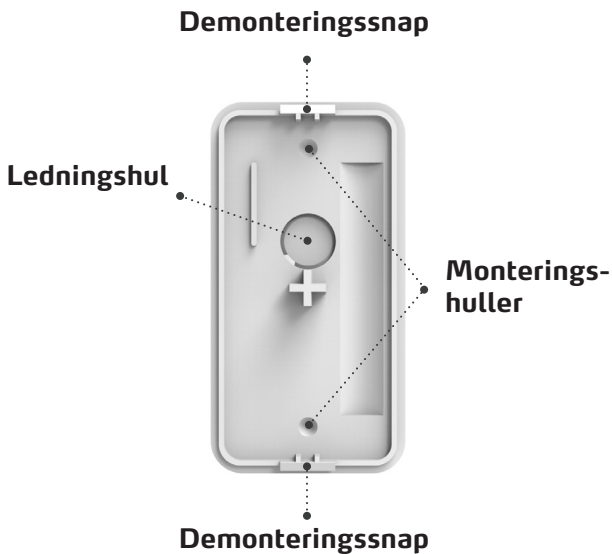

Isæt batteri

Detect Door Pro benytter et specielt 3,6V ER 14505 batteri, som skal isættes.

- 1 Åben Detect Door Pro ved at trykke på demonteringsknappen enten i toppen eller bunden af enheden med en flad skruetrækker.
- 2 Læg batteriet i batteriskuffen. Sørg for, at batteriet placeres i henhold til + og - symbolerne i batteriskuffen.
- 3 Tryk fronten af Detect Door Pro på plads på bagpladen, indtil der høres et klik.

Parring til Puzzle Pro modtagere

Detect Door Pro senderen skal parres med Puzzle Pro modtageren/modtagerne.

Vi anbefaler, at du parrer enhederne, før du monterer dem.

- 1 Sæt Detect Door Pro i parringsmode. Tryk på Detect Door Pro's trykknop, og hold den inde i ca. 10 sekunder, indtil den er i parringsmode, og statusindikatoren blinker rødt og blå. Detect Door Pro er nu i parringsmode i ca. 5 minutter.
- 2 Færdiggør parringen ved hjælp af din Puzzle Pro modtager (se evt. Puzzle Pro modtagerens brugervejledning).

Når både Detect Door Pro og Puzzle Pro modtageren er i parringsmode, tager parringen ca. 5-10 sekunder. Ved succesfuld parring vil Detect Door Pro's statusindikator lyse lyseblå.

Parring til Puzzle Pro modtagere

- 3 Detect Door Pro vil fortsat lyse lyseblåt og være i parringsmode i ca. 5 minutter, også efter at parringen er succesfuldt afsluttet. Flere enheder kan parres samtidig. Tryk på trykknappen på Detect Door Pro, hvis du ønsker at afslutte parringsmode. Lyset i statusindikatoren slukkes.
- 4 Test evt. om parringen er foretaget korrekt ved at trykke på Detect Door Pro's trykknop igen. Er parringen foretaget korrekt, lyser Detect Door Pro's statusindikator nu hvidt, og de parrede Puzzle Pro modtagere aktiveres.

Detect Door Pro's statusindikatorer:

Lys	Status
Konstant hvid	Aktiv
Blinker rød og blå	I parringsmode
Konstant lyseblå	Succesfuld parring og i parringsmode (efter én modtager er parret)

Slet parring til Puzzle Pro modtagere

- 1 Tryk på Detect Door Pro's testknap, og hold den inde i ca. 10 sekunder, indtil statusindikatoren blinker rødt og blå.
- 2 Slip testknappen og vent i et par sekunder, og tryk derefter på testknappen igen, indtil statusindikatoren lyser rødt. Alle parringer til Detect Door Pro er nu slettet.
- 3 Test evt. om parringerne er slettet korrekt ved at trykke på Detect Door Pro's testknap igen. Er parringerne slettet korrekt, lyser Detect Door Pro's statusindikator nu hvidt, men ingen af Puzzle Pro modtagerne aktiveres.

BEMÆRK

Alle parringer til Detect Door Pro vil blive slettet.

Installering

Detect Door Pro kan enten anvendes enkeltstående eller tilsluttes en eksisterende dørklokkeinstallation.

Derudover kan Detect Door Pro fastmonteres med skruer eller sættes op med velcrobånd.

Enkeltstående dørklokkeinstallation med montering med velcrobånd

- 1 Sæt velcrobånd på bagsiden af Detect Door Pro.
- 2 Monter dørklokken det ønskede sted.

Installering

Enkeltstående dørklokkeinstallation med fastmontering med skruer

- 1 Åben Detect Door Pro ved at trykke på demonteringsknappen enten i toppen eller bunden af enheden med en flad skrueetrækker.
- 2 Skru bagsiden af Detect Door Pro fast det ønskede sted. Skru skrueerne gennem de to monteringshuller.
- 3 Tryk fronten af Detect Door Pro på plads på bagpladen, indtil der høres et klik.

BEMÆRK

Skruer er ikke vedlagt i pakken.

Installering

Tilslutning til eksisterende dørklokke

- 1 Åben Detect Door Pro ved at trykke på demonteringsknappen enten i toppen eller bunden af enheden med en flad skruetrækker.
- 2 Skub det materiale, der sidder i ledningshullet på Detect Door Pro, ud fx ved hjælp af en skruetrækker.
- 3 Før ledningerne fra din eksisterende dørklokke gennem hullet.
- 4 Skru enten bagsiden af Detect Door Pro fast i det ønskede sted ved hjælp af de to monteringshuller (se side 14) eller anvend velcrobånd.
- 5 Klip ledningen fra den eksisterende dørklokke til en længde på ca. 5 cm.
- 6 Fjern 3 mm af isoleringen fra begge ledninger.

- 7 Sæt de to ledninger ind i hullerne i indgangsstikkene.

Sæt først den ene ledning i det ene indgangsstik ved at trykke ned på låsen under det valgte indgangsstik, indsætte ledningen og slippe låsen igen.

Sæt derefter den anden ledning i det andet indgangsstik på samme måde.

BEMÆRK

Overskydende ledning kan gemmes inde i kassen.

- 8 Tryk fronten af Detect Door Pro på plads på bagpladen, indtil der høres et klik.
- 9 Tryk på Detect Door Pro's trykknop for at teste, at den eksisterende ringeklokke nu ringer, og at de parrede Puzzle Pro modtagere aktiveres.

Fejlsøgning

Fungerer din Detect Door Pro trådløse dørklokke ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere nedenstående fejlmuligheder:

Statusindikatoren på Detect Door Pro tændes ikke, når du trykker på trykknappen

- Kontroller, om batteriet er isat korrekt.
- Udskift batteriet. Anvend kun batteritypen 3,6V ER 14505.

Statusindikatoren på Detect Door Pro tændes, men ingen eller kun nogle af Puzzle Pro systemets modtagere udsender et alarmsignal

- Par Detect Door Pro og Puzzle Pro modtagerne igen.

Afhjælper dette ikke problemet, kontakt da venligst din Phonic Ear forhandler/installatør.

Test og godkendelser

Detect Door Pro er godkendt og CE-mærket i henhold til direktiverne RED (fx R&TTE) 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU og LVD 2014/35/EU.

Kontaktinformation:
Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark

C € 1299

Miljøinformation



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved udviklingen og fremstillingen af dit Phonic Ear produkt er der anvendt materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet, hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.

Batterier er mærket med viste overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet, hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejllens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.

Sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel

Litium-batteri indeni. Fare for brand, eksplosion og alvorlige forbrændinger, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Må ikke genoplades, skilles ad, opvarmes til over 100 °C, forbrændes eller udsættes for vand eller direkte sollys.

For at forhindre kortslutning skal du sørge for, at metalgenstande ikke kommer i berøring med batteriet.

Lad være med at adskille, ændre eller udsætte dette produkt for tryk, så der kan opstå skader på elektroniske kredsløb, hvilket kan medføre en svækkelse af produktets sikkerhedsforanstaltninger.

Vigtig bemærkning

Litium-batterier må ikke åbnes eller forbrændes. Udsættelse for stoffer indeholdt i produktet eller opstået i forbindelse med afbrænding heraf vil kunne medføre personskade.

Batteriet er godkendt til lufttransport.



Din forhandler

20002PE 01.20

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.: 3917 7101
mail@phonicear.dk
www.phonicear.dk

 **Phonic Ear**[®]