

Easy LE Adapter



Guide til parring og fejlfinding


oticon
life-changing **technology**

Oversigt

Oplev den gode kvalitet med lydstreaming med den nye Bluetooth®-teknologi, kaldet LE Audio, som er integreret i Easy LE Adapter. Denne enhed giver mulighed for håndfri kommunikation med Android™-telefoner, -tablets samt pc'er med USB-C-indgang, som ikke understøtter LE Audio. Easy LE Adapter sikrer en nem overgang til den nye æra med håndfri tovejs lydstreaming ved både telefonsamtaler, videochats og musikstreaming i en fantastisk kvalitet.

Bemærk: Dine høreapparater skal understøtte LE Audio for at kunne bruges sammen med en Easy LE Adapter.

De fleste telefoner og tablets med et 3,5 mm jackstik vil ikke fungere sammen med adapteren.

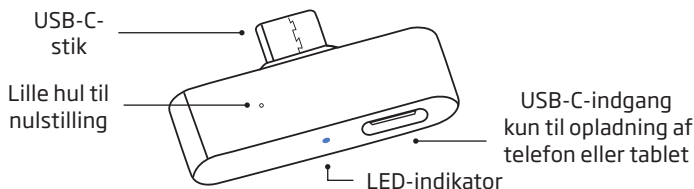


Parring af Easy LE Adapter




Trin 1

- Sæt Easy LE Adapter i USB-C-indgangen på din telefon, tablet eller pc.
- Adapteren tændes og går i parringstilstand (hvis der ikke allerede er en parret enhed).
- LED-indikatoren på Easy LE Adapter blinker hurtigt blå i parringstilstand. I denne tilstand søger Easy LE Adapter efter LE Audio-enheder i en radius på to meter.

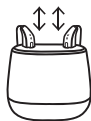

Trin 2


- Genstart høreapparaterne ved at sætte dem i opladeren og derefter tage dem ud igen.
- Herefter vil de være i parringstilstand i tre minutter.

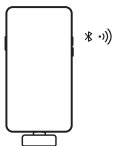

Trin 3

- Vent på, at høreapparaterne og adapteren parres.
- Parringen er gennemført, når LED-indikatoren skifter fra at blinke blåt til at lyse konstant blåt i fem sekunder og derefter slukke.
- Du kan nu streame lyd eller foretage håndfrie opkald via Easy LE Adapter.

Andre funktioner

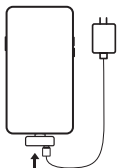

Opladning af din telefon eller tablet via Easy LE Adapter

- Du kan oplade din telefon eller tablet med op til 9V/2A eller 5V/3A standardopladning. Der kan ikke leveres nok strøm gennem adapteren til at oplade en pc.
- Sæt blot opladningskablet i Easy LE Adapter for at oplade din enhed.
- Opladningstiden vil variere afhængig af enhedens batterikapacitet.
- Teknologier for hurtig opladning eller dataoverførsel understøttes ikke, når opladningsporten benyttes. For at kunne overføre data skal du fjerne Easy LE Adapter fra din enhed og derefter isætte dit kabel.



Nulstilling og sletning af parring af Easy LE Adapter

- Sørg for, at adapteren sidder i din telefon, tablet eller pc, så den er tændt.
- For at nulstille adapteren skal du trykke et spidst værktøj ind i det lille hul, indtil LED-indikatoren på adapteren begynder at blinke blåt. Den er nu klar til at blive parret med en ny LE Audio-enhed.

Tip: Easy LE Adapter mister ikke parringen med høreapparaterne, når den tages ud af din telefon, tablet eller pc og sættes i en anden enhed. Det betyder, at du nemt kan streame fra forskellige enheder med en USB-C-indgang.

Bemærk: Man kan kun have et par høreapparater eller anden LE Audio-enhed tilsluttet ad gangen.

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Spørgsmål

Svar

Hvilke enheder kan Easy LE Adapter bruges sammen med?

- Easy LE Adapter kan streame lyd til høreapparater, høretelefoner eller andre trådløse lydenheder, der understøtter LE Audio.
- Adapteren er optimeret til brug med Android-telefoner og -tablets samt pc'er med USB-C-indgang.
- Adapteren er ikke beregnet til brug med telefoner, tablets eller pc'er, der understøtter LE Audio, og den er ikke beregnet til brug med iPhone eller iPad.
- De fleste telefoner og tablets med et 3,5 mm jackstik vil ikke fungere med adapteren, da mange producenter vælger at føre lyden gennem jacksticket i stedet for USB-C-indgangen.

Min enhed har ikke en USB-C-indgang. Kan jeg tilslutte Easy LE Adapter til en usb-adapter, der passer til min telefon, tablet eller pc?

- Ja, det er muligt at bruge en adapter, for eksempel en USB-C- til USB-A-adapter. Der er dog ingen garanti for, at adaptere fra tredjepart vil fungere med Easy LE Adapter.

Kan jeg besvare og afslutte opkald enten ved at bruge trykknappen eller tappe på mine høreapparater?

- Nej, det er ikke muligt. Når adapteren sidder i din enhed, understøttes betjening af opkald via knapper eller tap ikke.
- Besvar eller afslut opkald via din telefon, tablet eller pc.
- Når du streamer lyd eller opkald, vil knapperne på høreapparaterne bruges til at indstille lydstyrken for det, du streamer (hvis din hørespecialist har aktiveret denne funktion).

Easy LE Adapter er tilsluttet min telefon, tablet eller pc, men der er ingen lyd. Hvad kan jeg gøre?

- Kontrollér, at der er skruet op for lydstyrken både på den enhed, du streamer fra, og dine høreapparater.
- Sørg for, at korrekt lydkilde er valgt på din enhed (fx "kabelforbundet headset" på telefon/tablet og "Easy LE Adapter" på pc).
- Slå Bluetooth fra og derefter til igen.
- Tag Easy LE Adapter ud af enhedens USB-C-indgang, og sæt den i samme sted for at genstarte adapteren.
- Hvis disse forslag ikke løser problemet, skal du nulstille adapteren og derefter parre den igen.

Oftestillede spørgsmål og fejlfinding

Spørgsmål	Svar
Lyden er forvrænget eller hakker. Hvad kan jeg gøre?	• Flyt dig tættere på den enhed, som Easy LE Adapter er tilsluttet. Bluetooth-forbindelsen kan blive påvirket af afstand og forhindringer. • Sørg for en stabil internetforbindelse eller stabilt telefonsignal, hvis du streamer online eller er i gang med en telefonsamtale.
Easy LE Adapter sidder løst eller passer ikke ordentligt i USB-C-indgangen på min telefon, tablet eller pc. Hvad kan jeg gøre?	• Adapteren har et forlænget USB-C-stik, der er designet til at passe til standard telefon- og tabletcovers, men den passer måske ikke ordentligt med covers, der er meget tykke. Prøv at fjerne coveret, før du sætter adapteren i enheden. • Snavs inde i USB-C-stikket kan forårsage, at adapteren ikke sidder ordentligt. Rengør forsigtigt USB-C-indgangen i henhold til anvisninger fra producenten af enheden.
Efter jeg tilsluttede Easy LE Adapter til min enhed, mistede mine høreapparater forbindelsen til min høreapparatapp eller enhed. Hvad kan jeg gøre?	• Når adapteren sættes i USB-C-indgangen, genstartes Bluetooth-forbindelsen i den enhed, den tilsluttes. Det betyder, at høreapparater eller andre lydenheder nogle gange kan miste forbindelsen til enheden og de apps, de er forbundet til. • Slå Bluetooth fra og derefter til igen for at genoprette forbindelsen til høreapparaterne eller andre lydenheder.

Easy LE Adapter er produceret af Minami Acoustics Limited

Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker foregår under licens til Minami Acoustics Limited. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.

www.oticon.dk

Oticon is part of the Demant Group.

oticon
life-changing **technology**