

# PocketVib Pro

---

Puzzle Pro  
trådløs vibrator

Brugervejledning  
Dansk



 **Phonic Ear**<sup>®</sup>  
*Connected to life*

# Indholdsfortegnelse

Introduktion	4
Pakkens indhold	5
Oversigt	6
Tilbehør	8
Montér/afmontér bælteclips	9
Tilslut strømfor­syning	10
Tænd/sluk for PocketVib Pro	11
Oversigt over startskærm	12
Oversigt over hovedmenu	13
Indstil ur og urets tidsformat	14
Indstil dato	15
Indstil alarm	16
Indstil alarmens lydstyrke	17
Indstil alarmens melodi	18
Indstil melodiens frekvens	19
Se ubesvarede alarmsignaler	20
Indstil lysstyrke	21
Indstil sprog	22
Sæt PocketVib Pro i parringsmode	23
Indstil alarmsymbol	24
Slet tilsluttet alarmsender	25
Fejlsøgning	26
Test og godkendelser	27
Miljøinformation	28
Garanti	30
Sikkerhedsforanstaltninger	33

## Introduktion

PocketVib Pro er Puzzle Pro systemets trådløse vibrator. PocketVib Pro modtager alarmsignaler fra Puzzle Pro systemets alarmsendere fx Detect Pro og/eller Detect Door Pro.

Når en alarm fra én af Puzzle Pro systemets alarmsendere fx Detect Pro og/eller Door Pro modtages, vibrerer PocketVib Pro, lysrammen lyser, og en melodi afspilles.

PocketVib Pro har display, hvor du kan se de enkelte alarmsignaler og alarmhistorik.

Hver alarm gengives med sit eget unikke vibrationsmønster, eget unikke symbol i displayet og lysindikation i lysrammen, hvilket gør det nemmere at skelne mellem forskellige alarmsignaler.

# Pakkens indhold

Pakken indeholder følgende dele:



PocketVib Pro  
trådløs vibrator



Bælteclips




Strømforsyning  
(5V micro usb)



Brugervejledning

# Oversigt

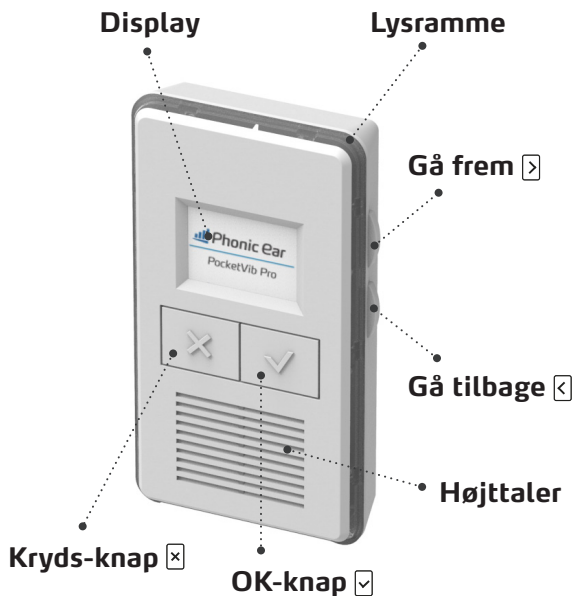

# Overzicht

## Bælteclips-holder

Til montering af  
bælteclips

## Vandalsikring



## Strømforsyningsstik

Til tilslutning af 5V  
micro usb strømforsyning

## **Tilbehør** (Købes separat)


### **Charger for PocketVib Pro**

Dockingstation til opladning af PocketVib Pro samt tilslutning af sensorer og/eller pude- og sengebundsvibrator.



## Montér bælteclips

Bælteclipsen monteres på bagsiden af PocketVib Pro ved at indsætte bælteclipsen i slisen og skubbe den opad, indtil der kommer en kliklyd:

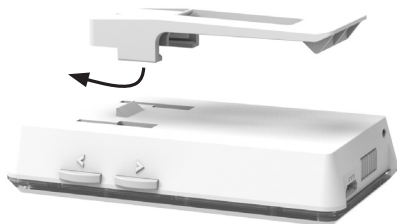

## Afmontér bælteclips

Afmonter bælteclipsen ved at løfte snappen udad og samtidig skubbe bælteclipsen nedad.



## **Tilslut strømfor syning**


Sæt strømfor syningen i det korrekte stik i bunden af PocketVib Pro (se evt. oversigten på s. 7).

Strømfor syningen sættes derefter i stikkontakten, og stikkontakten tændes.


PocketVib Pro har et indbygget genopladeligt batteri.

Fuldt opladet har batteriet i PocketVib Pro en standbytid på 1-3 døgn afhængigt af antal aktiveringer om dagen og batteriets alder (kapacitet).

## Tænd for PocketVib Pro

Hold  inde i ca. 5 sekunder, indtil der kommer lys i displayet, og velkomstskærmen vises.

## Sluk for PocketVib Pro

Hold  inde i ca. 5 sekunder, indtil beskeden "Slukker" vises på skærmen. Herefter slukkes PocketVib Pro.

### Bemærk

---

Holdes  inde i ca. 20 sekunder sættes PocketVib Pro i lagringstilstand (storage mode).

Ved genoptaget brug efter lagringstilstand (storage mode) skal tid og dato indstilles igen.

## Øversigt over startskærm

### Alarm

Vises, når alarm er slået til

### Ubesvaret alarm

Vises, når der er en ubesvaret alarm under alarmhistorik

### Batteri-indikator



Ur

Dato

# Overzicht over hovedmenu



## Alarmhistorik

Se ubesvarede alarmsignaler  
(vises kun i menuen, hvis der er ubesvarede alarmer)



## Alarm

Indstil alarm



## Ur

Indstil ur



## Dato

Indstil dato



## Lydstyrke

Indstil lydstyrke



## Frekvens

Indstil melodiens frekvens



## Tidsformat

Indstil urets tidsformat  
(12 / 24 timer digital ur)



## Lysstyrke

Indstil lysrammens lysstyrke



## Melodi


Indstil alarmens melodi




## Sprog

Indstil sprog






## Indstil ur


- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke på   
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (Ur). Tryk på
- 2 Brug  og  til at indstille timeslag.  
Godkend valg med   
  
Brug herefter  og  til at indstille minutslag. Godkend valg med
- 3 Afslut ved at trykke på

## Indstil urets tidsformat


- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke på   
Brug  og  til at navigere til ikonet  (Tidsformat) og tryk på
- 2 Brug  og  til at skifte mellem 12 timer / 24 timer digital ur.  
Godkend valg med
- 3 Afslut ved at trykke på

## Indstil dato

① Åbn hovedmenuen ved at trykke på   
Brug herefter  og  for at navigere til  
ikonet  (Dato) og tryk på 

② Brug herefter  og  for at indstille  
årstal. Godkend valg med 

Gentag for værdierne [måned] og [dato].






③ Afslut ved at trykke på 

### Bemærk




---

PocketVib Pro finder automatisk den korrekte ugedag, når datoen er korrekt indstillet.

## Indstil alarm


① Åbn hovedmenuen ved at trykke på   
Brug herefter  og  for at navigere til  
ikonet  (Alarm) og tryk på 

② Aktiver/deaktiver alarmen med 

③ Brug  og  til at navigere til feltet  
[indstil alarm] og tryk på 










Brug herefter  og  til at indstille  
timeslag. Godkend valg med 

Brug herefter  og  til at indstille  
minutslag. Godkend valg med 

④ Afslut ved at trykke to gange på 










Alarmen er nu slået til, og alarmikonet  
vises på startskærmen.

## Indstil alarmens lydstyrke










- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke på   
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (Lydstyrke) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at justere lydstyrken.  
Godkend valg med 
- 3 Afslut ved at trykke på 












## Indstil alarmens melodi

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke på   
Brug  og  til at navigere til ikonet  (Alarmmelodi) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at skifte melodi.  
Godkend valg med 
- 3 Afslut ved at trykke på 

## Indstil melodiens frekvens

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke på   
Brug  og  til at navigere til ikonet  (Frekvens) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at justere frekvensen.  
Godkend valg med 
- 3 Afslut ved at trykke på 

## Se ubesvarede alarmsignaler










- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke på   
Brug  og  til at navigere til ikonet  (Alarmhistorik) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at navigere mellem de ubesvarede alarmsignaler.
- 3 Afslut ved at trykke på  eller 

### Bemærk










---

Ikonet alarmhistorik er kun synligt, hvis der er ubesvarede alarmsignaler.








## Indstil lysstyrke

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke på   
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (Lysstyrke) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at justere lysrammens lysstyrke. Godkend valg med 
- 3 Afslut ved at trykke på 



## Indstil sprog

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke på   
Brug  og  til at navigere til ikonet  (Sprog) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at skifte sprog.  
Godkend valg med 
- 3 Afslut ved at trykke på 




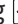














## Sæt PocketVib Pro i parringsmode

- 1 Sæt din Puzzle Pro sender i parringsmode (se evt. senderens brugervejledning)
- 2 Sluk PocketVib Pro ved at holde  inde i ca. 5 sekunder.
- 3 Tænd for PocketVib Pro ved at holde  inde, og tryk dernæst på , så snart velkomstkærmen vises.
- 4 Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (Tilslut) og tryk på 

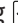Lysrammen vil blinke rød og blå, og PocketVib Pro er nu i parringsmode i ca. 5 minutter. Ved succesfuld parring vil lysrammen i PocketVib Pro lyse lyseblå.

- 5 PocketVib Pro vil fortsat lyse lyseblå og være i parringsmode, også efter at parringen er afsluttet. Tryk på , hvis du ønsker at afslutte parringsmode.
- 6 Afslut ved at trykke på 
- 7 Tryk på senderens testknap (fx Detect Pro) for at teste, at parringen er foretaget korrekt.

## Indstil alarmsymbol

















- 1 Sluk PocketVib Pro ved at holde  inde i ca. 5 sekunder.
- 2 Tænd for PocketVib Pro ved at holde  inde, og tryk på , så snart velkomstskærmen vises.
- 3 Brug  og  for at navigere til ikonet  (Meddelelser) og tryk på .
- 4 Brug  og  for at navigere til senderen, der ønskes redigeret, og tryk på .
- 5 Brug  og  for for at navigere til ikonet  (Rediger) og tryk på .
- 6 Brug  og  for skifte mellem de forskellige alarmsymboler.
- 7 Godkend valg med .
- 8 Afslut ved at trykke to gange på .

### Bemærk

---

Når du skifter alarmsymbol, ændrer du også melodi og farve.

## Slet tilsluttet alarmsender

- 1 Sluk PocketVib Pro ved at holde  inde i ca. 5 sekunder.
- 2 Tænd for PocketVib Pro ved at holde  inde, og tryk på , så snart velkomstskærmen vises.
- 3 Brug  og  for at navigere til ikonet  (Meddelelser) og tryk på .
- 4 Brug  og  for at navigere til senderen, der ønskes redigeret, og tryk på .
- 5 Brug  og  for for at navigere til ikonet  (Slet) og tryk på .
- 6 Bekræft, at du vil slette med .  
Den valgte alarmsender er nu slettet.
- 7 Afslut ved at trykke to gange på .



# Fejlsøgning

Fungerer din PocketVib Pro ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere de enkelte fejlmuligheder nedenfor:

## **Ingen strøm på PocketVib Pro**

- Tjek, at stikkontakten på væggen er tændt.
- Tjek, at alle tilslutninger er korrekt tilsluttet.

## **Intet lys i lysrammen**

- Tjek, at lysstyrken er indstillet korrekt (se s. 21).

## **Ingen lyd ved alarmsignal**

- Tjek, at lydstyrken er indstillet korrekt (se s. 17).

## **PocketVib Pro modtager ikke alarmsignaler fra Puzzle Pro senderen**

- Par PocketVib Pro og Puzzle Pro senderen igen (se s. 23).

Afhjælper dette ikke problemet, kontakt da venligst din Phonic Ear forhandler/installatør.

## Test og godkendelser

PocketVib Pro er godkendt og CE-mærket i henhold til direktiverne RED (fx R&TTE) 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU og LVD 2014/35/EU.

Kontaktinformation:

Phonic Ear A/S  
Kongebakken 9  
2765 Smørum  
Danmark

**C € 1299**

## Miljøinformation



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved udviklingen og fremstillingen af dit Phonic Ear produkt er der anvendt materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.

Batterier er mærket med viste overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

# Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

## Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

## Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejllens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

## Hvad dækker garantien ikke

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

### **Hvad gør du, hvis du har brug for service**

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.

# Sikkerhedsforanstaltninger

## Advarsel

Genopladeligt litium-batteri indeni. Fare for brand, eksplosion og alvorlige forbrændinger, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Må ikke skilles ad, opvarmes til over 100 °C, forbrændes eller udsættes for vand eller direkte sollys.

For at forhindre kortslutning skal du sørge for, at metalgenstande ikke kommer i berøring med batteriet.

Lad være med at adskille, ændre eller udsætte dette produkt for tryk, så der kan opstå skader på elektroniske kredsløb, hvilket kan medføre en svækkelse af produktets sikkerhedsforanstaltninger.

## Vigtig bemærkning

Genopladelige litium-batterier må ikke åbnes eller forbrændes. Udsættelse for stoffer indeholdt i produktet eller opstået i forbindelse med afbrænding heraf vil kunne medføre personskade.

Batteriet er godkendt til lufttransport.





Din forhandler

20039PE 09.20

Phonic Ear A/S  
Kongebakken 9  
2765 Smørum  
Tlf.: 3917 7101  
mail@phonicear.dk  
www.phonicear.dk

 **Phonic Ear**<sup>®</sup>