



DK

Brugervejledning

Signalux dørtryk

Introduktion


Signalux dørtryk er en af Signalux alarmsystemets sendere. Det er en trådløs dørklokke og erstatter den almindelige trykknop ude foran døren.

Når en besøgende trykker på Signalux dørtrykket, sendes et trådløst signal til alarmsystemets modtagere.

Et Signalux alarmsystem består af mindst én sender og én modtager. Signalux dørtryk fungerer med alle Signalux-modtagere, fx Signalux fyrtårn, Signalux lys- og lyd giver, Signalux trådløs vibrator, Signalux lysgiver og Signalux vækkeur og alarmmodtager.

Husk at læse brugervejledningen grundigt. Den beskriver, hvordan Signalux dørtryk sættes op, og du lærer enhedens funktioner at kende.

Øversigt

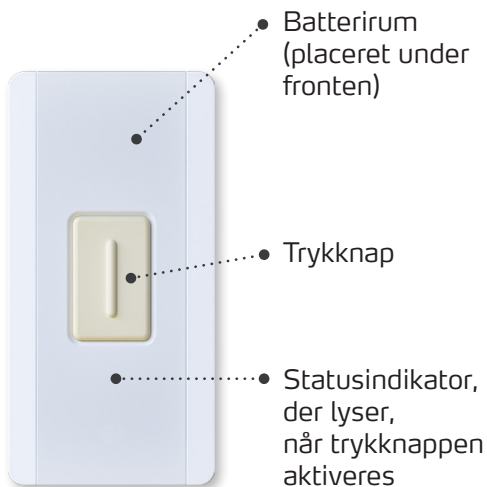

Pakkens indhold

Pakken indeholder følgende dele:

- Signolux dørtryk
- Litium-batteri CR2032 3 V (er isat)
- Dobbeltklæbende strimmel
- Brugervejledning

Kontakt din forhandler, hvis nogle af disse dele mangler.

Opsætning

Ved levering er batteriet allerede isat, og Signolux dørtryk er klar til brug.

Forudindstillede symboler

Signolux-enheder kan bruges sammen uden forudgående parring af enhederne.



Signolux dørtryk er forudindstillet til at vise symbolet for dørklokke 2 på Signolux-modtagerne.

Bemærkning 1

Hvis Signolux dørtryk skal vises med et symbol efter eget valg, kan dette gøres som beskrevet i afsnittet "Parring og valg af symbol".

Vær opmærksom på, at den pågældende Signolux-modtager i så fald skal have parret alle Signolux-sendere med forudindstillede symboler op individuelt, som skal kunne vises på modtageren. Dette gælder også de sendere, der tidligere har været vist med et forudindstillet symbol.

Bemærkning 2

Er der gentagne gange falske alarmer, når du bruger senderens forudindstillede symbol, kan dette antyde, at et andet Signolux-system i nærheden forårsager interferens. I dette tilfælde kan problemet løses ved individuelt at parre alle Signolux-sendere og -modtagere (se afsnittet "Parring og valg af symbol").

Parring og valg af symbol

Du kan selv vælge, hvilket symbol Signolux dørtryk skal tildeles.

Sådan ændrer du symbol

- a) Tryk og hold funktionsknappen på den pågældende modtager inde i ca. 10 sekunder. Symbolerne blinker i rækkefølge. Slip funktionsknappen, så snart det ønskede symbol lyser.


- b) Udløs nu et signal ved at trykke på trykknappen på Signolux dørtryk.

- c) Vent ca. 20 sekunder, og afprøv funktionen ved at trykke på trykknappen på Signolux dørtryk. Signolux-modtageren bør nu reagere og vise det nye tildelte symbol.

Udskiftning af batteri


For at skifte batteriet (litium-batteri CR2032 3 V) skal du først åbne til batterirummet.

- a) Tag det gennemsigtige frontcover af ved at løfte i dens ene ende af dørtrykket (A). Hvis det er nødvendigt, kan en lille flad skrueetrækker benyttes.

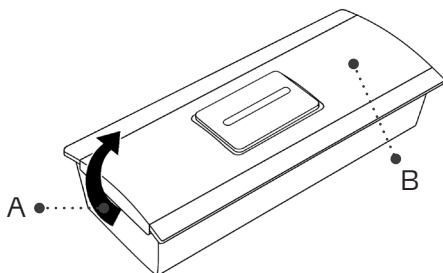

- b) Nu er det muligt at løsne frontcoveret fra den anden ende af dørtrykket, så det gennemsigtige frontcover kan tages af.
- c) Skru den lille skrue ud (B) med en lille skrueetrækker og tag fronten af dørtrykket. Derunder sidder batteriet.

- d) Tag det gamle batteri ud. Du kan evt. bruge en lille flad skruetrækker og løfte kanten en smule (C). Derefter kan du tage batteriet ud.

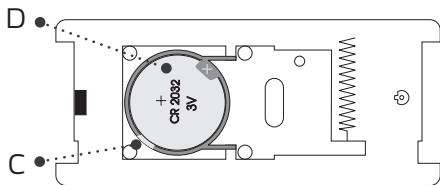

- e) Sæt det nye batteri (CR 2032) i (D). Sørg for, at batteriet vender korrekt.
- f) Sæt dørtrykkes front på og tryk godt sammen på enheden, til fronten er klikket fast. Sørg for, at gummipakningen sidder korrekt.
- g) Skru forsigtigt den lille skrue (B) i med en lille skruetrækker.
- h) Sæt det gennemsigtige frontcover på i den ene ende af dørtrykket, og tryk ned i den anden ende, indtil frontcoveret klikkes på.

Montering

Signalux dørtryk kan monteres ved hjælp af den medfølgende dobbelklæbende strimmel. Sørg for at klæbe den på en glat, tør og ren overflade.

VIGTIGT

Vær opmærksom på, at metaldele og andre byggematerialer kan forstyrre signalet. Disse kan både være synlige og skjulte på monteringsstedet, og du bør derfor altid lave en funktionstest på monteringsstedet, før du begynder monteringen. Er signalmodtagelsen ustabil, bør du vælge et andet monteringssted.

Fejlsøgning

Fungerer dit Signolux dørtryk ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere disse fejlmuligheder:

Statusindikatoren på Signolux dørtryk tænder ikke, når du trykker på trykknappen

- Kontroller, at batteriet er isat korrekt.
- Udskift batteriet. Anvend kun batteritypen CR 2032.

Statusindikatoren lyser, når du trykker på Signolux dørtryk, men Signolux-modtagerne modtager ikke signalet

- Par Signolux dørtryk med Signolux-modtagerne igen.

Alarmodtagerne afgiver signal – tilsyneladende uden grund

- Det kan antyde, at et andet Signolux alarmsystem i nærheden forårsager interferens. Par alle Signolux sendere og modtagere individuelt (se afsnittet "Parring og valg af symbol")

Afhjælper dette ikke problemet, kontakt da venligst din Phonic Ear forhandler/installatør.

Generelle advarsler

Kvælningsfare og risiko for at sluge små dele

Opbevar Signolux-enheder utilgængelige for børn. Pakken indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsfare.

Brug af batterier

Brug kun et litium-batteri CR2032 3 V til enheden. Brug af anden batteritype kan beskadige enheden. Batterier må ikke udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer eller lavt atmosfærisk tryk. Ved misbrug eller ukorrekt anvendelse af batterier er der risiko for, at de lækker. I ekstreme tilfælde er der risiko for eksplosion, brand og udvikling af røg og gas.

Test og godkendelser

Dette produkt lever op til kravene i følgende EU-direktiver:

- 2011/65/EF + 2015/863/EF RoHS-direktivet
- 2012/19/EF WEEE-direktivet
- 2014/53/EF RED-direktivet

Overholdelsen af direktiverne anført ovenfor bekræftes af CE-mærket på produktet.

Erklæringer vedr. opfyldelse af CE-krav kan findes på www.humantechnik.com



Miljøinformation



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydset skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.

Batterier er mærket med viste overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad garantien dækker

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejls opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil det blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad garantien ikke dækker

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse enheder er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter, som ikke er tilsluttet, brugt eller installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Producenten forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte enheder.

Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven.

Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Phonic Ear for yderligere information og rådgivning.

Forhandler

 **Phonic Ear**[®]

Phonic Ear

Kongebakken 9

2765 Smørum

Tlf.: 4445 2530

E-mail: mail@phonicear.dk

www.phonicear.dk

Producent

Humantechnik GmbH

Im Wörth 25

D-79576 Weil am Rhein

Tyskland

Tlf.: +49 (0) 76 21/ 9 56 89-0

E-mail: info@humantechnik.com

www.humantechnik.com



HUMANTECHNIK