

# Instructions pour le retraitement des DemoFlex

La procédure de nettoyage et de désinfection suivante DOIT être effectuée avant de remettre les aides auditives DemoFlex à un nouvel utilisateur.

 Ne pas immerger les aides auditives dans un liquide car cela pourrait endommager les microphones.

## Matériel nécessaire :

- Petite brosse souple.
- Pour les procédures de nettoyage et de désinfection décrites, utilisez une lingette contenant à la fois des agents nettoyants et des désinfectants.
  - Les types de lingettes qui peuvent être utilisés sont les suivants :
    - CaviWipes
    - Autres lingettes dont les capacités de désinfection sont documentées et qui contiennent à la fois de l'éthanol/isopropanol comme désinfectant et des agents nettoyants (surfactants).

## 1. Préparation des aides auditives

- Retirez l'écouteur conformément aux instructions de Demant.
- Veillez à ce que les marquages de couleur gauche/droite soient apposés.

## 2. Nettoyage et désinfection des aides auditives

- Utilisez une brosse pour enlever les débris des fissures et des fentes.
- Utilisez une lingette pour nettoyer toutes les surfaces extérieures de l'aide auditive, y compris :
  - La fente entre les coques
  - L'interstice autour du bouton-poussoir
  - La zone entre les socles de charge.
  - Les interstices autour du marquage de couleur gauche/droite et de la plaque du numéro de série.
- Veillez à nettoyer toutes les surfaces extérieures de l'aide auditive.
- Inspectez visuellement l'appareil.
- S'il n'est pas propre, recommencez la procédure de nettoyage.
- Utilisez une nouvelle lingette pour désinfecter toutes les surfaces de l'aide auditive, y compris :
  - La fente entre les coques
  - L'interstice autour du bouton-poussoir
  - La zone entre les socles de charge.
  - Les interstices autour du marquage de couleur gauche/droite et de la plaque du numéro de série.
- Veillez à ce que le désinfectant soit appliqué sur toutes les surfaces.
- Laissez agir le désinfectant pendant au moins 3 minutes. Si le désinfectant sèche avant la fin des 3 minutes, appliquez-en à nouveau.
- Laissez l'aide auditive sécher à l'air libre.