


## Overzicht


---

**BELANGRIJKE OPMERKING:** Lees deze informatie en de gebruiksaanwijzing voordat u uw geluidsprocessor(s) gaat gebruiken.

### Voorkant

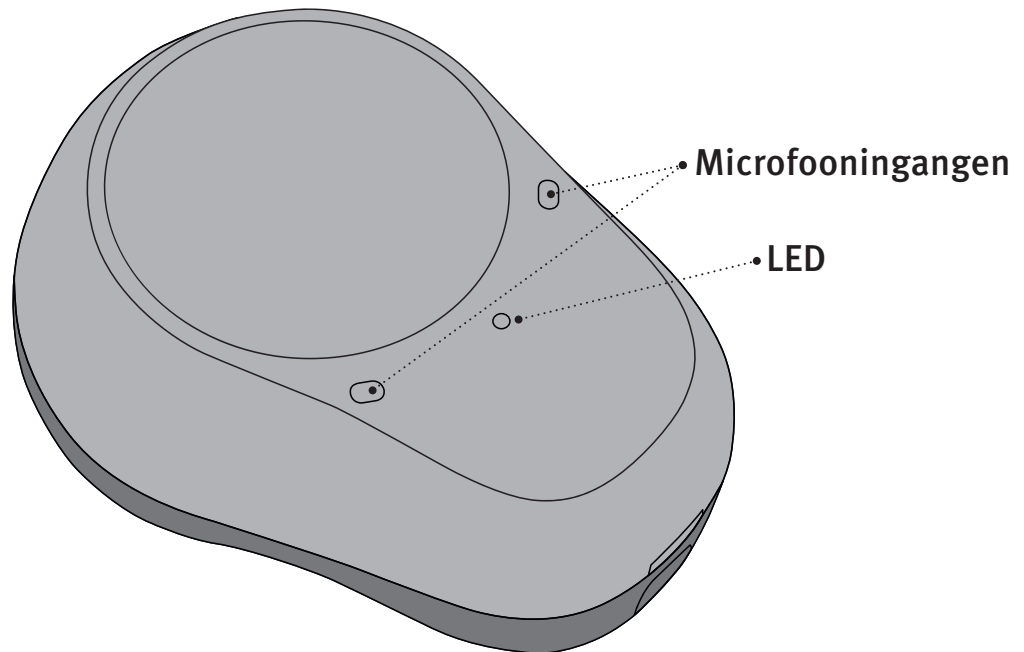

### Achterkant

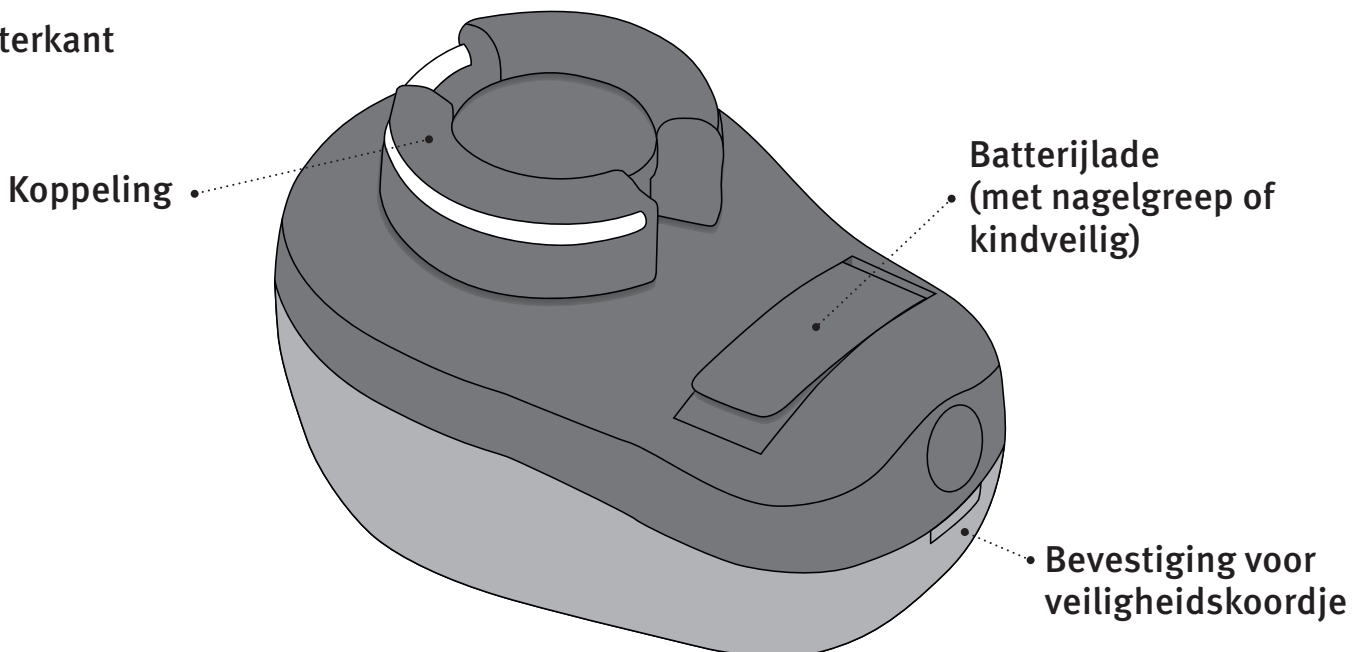




## Aan- en uitzetten van de processor

---

De batterijlade wordt ook gebruikt om het toestel aan- en uit te zetten. Zorg dat uw toestel uitstaat als u deze niet draagt; dat spaart de batterij.


### Aanzetten

Sluit de batterijlade met de batterij erin.

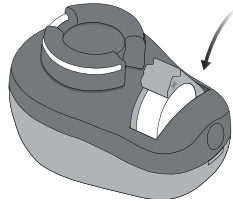

### Uitzetten





Open de batterijlade.

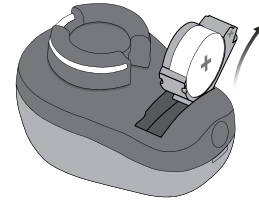

**BELANGRIJKE OPMERKING:** Gebruik niet de dempfunctie om het toestel uit te zetten; wanneer u dit namelijk wel doet, gebruikt het nog steeds stroom.

## De processor aansluiten en loskoppelen

---

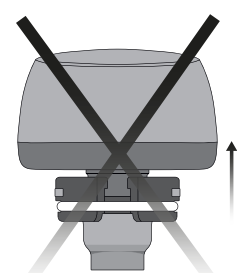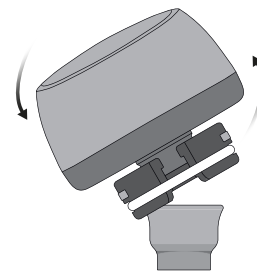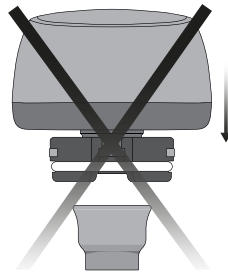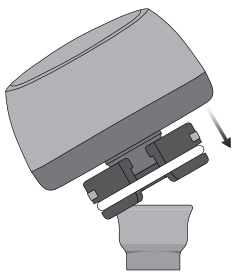

### Aansluiting

Om de geluidsprocessor veilig en comfortabel op het abutment te bevestigen, kantelt u hem lichtjes en drukt u hem voorzichtig op het abutment. Let op: voorkom dat uw haar tussen de processor en het abutment kan komen.

### Loskoppelen


Door de geluidsprocessor voorzichtig te kantelen, koppelt u hem veilig en comfortabel los van het abutment.

## De batterij vervangen

---


Als het tijd is om de batterij te verwisselen, hoort u drie pieptonen die met regelmatige tussenpozen herhaald worden totdat de batterij leeg is.

### 1. Oude batterij verwijderen

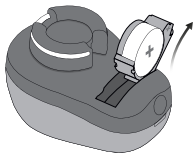

Open de batterijlade volledig.  
Verwijder de batterij.


### 2. Sticker verwijderen

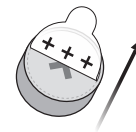

Verwijder de sticker van de pluszijde van de nieuwe batterij.


**TIP:** Wacht 2 minuten zodat de batterij kan ventileren om optimale werking te garanderen.

### 3. Plaatsen

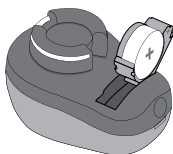

Plaats de nieuwe batterij in de batterijlade. Zorg ervoor dat de +-zijde omhoog gericht is.


### 4. Sluiten

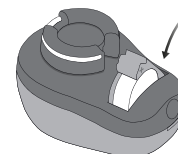

Sluit de batterijlade. Het hoortoestel speelt een melodietje af.

**TIP:** De MultiTool kan worden gebruikt om de batterij te vervangen. Gebruik het magnetische uiteinde voor het verwijderen en plaatsen van batterijen. De MultiTool is verkrijgbaar bij uw audicien.

**BELANGRIJKE OPMERKING:** Uw MultiTool heeft een ingebouwde magneet. Houd de MultiTool ten minste 30 cm verwijderd van creditcards en andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

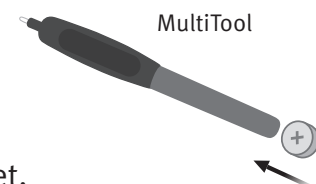



## Onderhoud van de geluidsprocessor

---

U kunt de buitenkant van de geluidsprocessor schoonmaken met een droge doek of met een babydoekje. Speciale aandacht moet worden besteed aan het verwijderen van vuil of vastzittend haar van de koppeling.

Let op: gebruik geen water of vloeistoffen om uw geluidsprocessor schoon te maken - de geluidsprocessor is niet waterdicht. Mocht de geluidsprocessor per ongeluk nat worden, open dan de batterijlade en laat de geluidsprocessor drogen.

Het is belangrijk dat u uw geluidsprocessor afschermt of verwijdert als u naar de kapper gaat of als u haarproducten in uw haar aanbrengt. Hiervoor kunt u de speciale abutmentcover gebruiken die bij uw geluidsprocessor is meegeleverd om uw abutment te beschermen.

De geluidsprocessor is persoonlijk voor u geprogrammeerd en dient daarom niet door anderen gebruikt te worden.



## Problemen oplossen

<b>Veelvoorkomende problemen en mogelijke oplossingen</b>		
<b>Symptoom</b>	<b>Mogelijke oorzaken</b>	<b>Oplossing</b>
<b>Geen geluid</b>	De batterij is leeg	Vervang de batterij
	De geluidsprocessor staat op stand-by (dempen)	Druk op de afstandsbediening of raadpleeg de Oticon ON App
<b>Onderbroken of verminderd geluid</b>	Vuil in de koppeling of geluids aansluiting	Maak de geluidsprocessor schoon
	Vocht	Open de batterijlade en laat de geluidsprocessor in de behuizing drogen
	De batterij is leeg	Vervang de batterij
<b>Fluitend geluid</b>	De geluidsprocessor raakt iets	Controleer of de geluidsprocessor correct is bevestigd op het abutment en niets raakt
<b>Koppelprobleem met Apple-apparaat</b>	Bluetooth-verbinding mislukt	1) Ontkoppel uw processor(s) (Instellingen→Algemeen→Toegankelijkheid→Gehoorapparaten→Apparaten→Vergeet dit apparaat). 2) Schakel Bluetooth uit en weer in. 3) Open en sluit de batterijlade van de processor(s). 4) Koppel de processor(s) opnieuw (zie hoofdstuk:"Toestellen koppelen met iPhone").
	Slechts één hoortoestel gekoppeld	

Als bovenstaande oplossingen niet werken, raadpleeg dan uw kliniek voor hulp.